


SUTURELESS

- Soluzione innovativa per i professionisti.
- Adesivo di grado medico sviluppato per la pratica clinica quotidiana nell'assistenza primaria e procedure chirurgiche.
- Adesivo tissutale ad alta prestazione, flessibile sulla pelle e resistente.
- SUTURELESS fornisce una forte adesione sigillante per ferite e incisioni, offre una protezione aggiuntiva all'area interessata durante il processo di guarigione.



Soluzione professionale

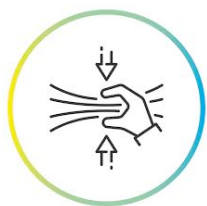

Alta resistenza



Protezione antimicrobica

Rapidità, Affidabilità,
Sicurezza



Sistema di erogazione
ad alta precisione con
fusto monodose
sterile da 0,5 ml

Applicazione facile e comoda

Prima di applicare, lavare con sapone antibatterico, risciacquare e asciugare.

Non applicare alcuna crema o unguento prima dell'applicazione dell'adesivo.


2 - Ravvicinare i bordi della ferita e applicare uno strato sottile di prodotto sull'area desiderata.

3 - Mantenere l'approssimazione finché l'adesivo non riesce a tenere insieme i bordi (circa 60 secondi).

4 - Assicurarsi che lo strato applicato sia completamente asciutto prima di lasciarlo entrare in contatto con altri oggetti.

Se necessario ripetere la procedura.

Rimozione. Il prodotto si dissolverà naturalmente man mano che lo strato dermico continua a crescere

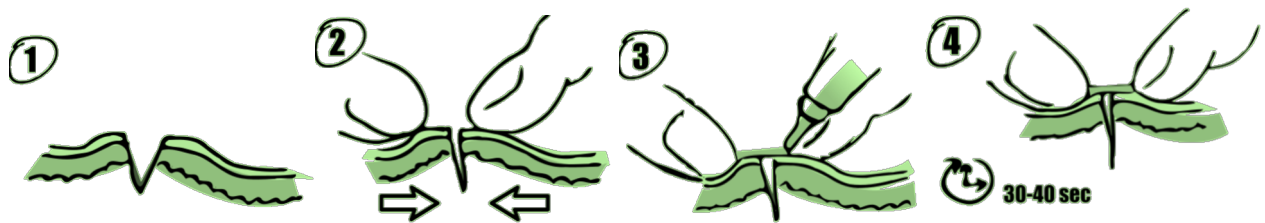

Adesivi medicali ad alte prestazioni

